



BBrain Sprechende Kalenderuhr



Hallo!

Vielen Dank, dass Sie sich für die **BBrain Sprechende Kalenderuhr** entschieden haben. Wir freuen uns darauf, Ihnen dabei zu helfen, das Beste aus Ihrer neuen Uhr herauszuholen. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie die Uhr verwenden und an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Inhaltsverzeichnis

Schnellstart

Bedienung Ihrer Uhr

Hauptkonfigurationsbildschirm

Einstellungen ändern

Sprache

Bildschirmmodus

Bildschirmfarbe

Datum einstellen

Zeit einstellen

Zeitmodus

Nachtmodus

Sommer-/Winterzeit

Tagesteil einstellen

Helligkeit

Sprechende Uhr

Lautstärke Einstellung

Werkseinstellungen

Neue Erinnerung festlegen

Übersicht Erinnerung

Fehlersuche


Weitere Informationen

Wichtige Sicherheitshinweise

Brauchen Sie mehr Hilfe?

Schnellstart

Die **BBrain Sprechende Kalenderuhr** wird in Betrieb genommen, indem (1) das Netzkabel in den runden Anschluss unter der Uhr eingesteckt wird und (2) das Netzteil an eine Steckdose angeschlossen wird.

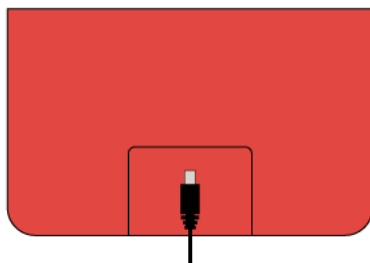

Nach einigen Sekunden zeigt die Uhr den BBrain-Begrüßungsbildschirm an, gefolgt von der Hauptanzeige für Zeit und Datum.

- i** Um die Zeit oder das Datum einzustellen und zwischen den verschiedenen Bildschirmmodi zu wählen, lesen Sie bitte den Abschnitt **Einstellungen ändern**.




Die Knopf für die **sprechende Uhr** befindet sich an der Oberseite. Drücken Sie darauf, um die Tages- und Zeitinformationen zu hören. Die Uhr hat drei Knöpfe zum Ändern von Einstellungen oder Erinnerungen.



Um den Hauptkonfigurationsbildschirm aufzurufen, drücken Sie **beide äußeren Knöpfe** gleichzeitig.

Bedienung Ihrer Uhr

Die Funktionen der Tasten unterscheiden sich je nach Menübildschirm und werden immer durch das Wort oder Symbol über den jeweiligen Knopf beschrieben. In einigen Fällen zeigen die Knöpfe **Nach oben** und **Nach unten** zum Navigieren in Menüs und eine Schaltfläche **OK** oder **Bearbeiten** zum Auswählen oder Ändern von Funktionen:

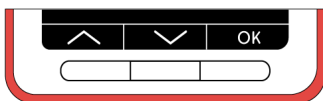

Bei der Bearbeitung des Datums müssen die Knöpfe mit den Auf- und Abwärtspfeilen verwendet werden, um den ausgewählten Wert zu ändern. Der ausgewählte Wert wird immer durch einen weißen quadratischen Cursor angezeigt. Mit der linken Pfeiltaste auf der rechten Seite können Sie zum nächsten Feld gelangen. Sobald der endgültige Wert erreicht ist, erscheint auf dem mittleren Knopf die Option **OK** mit der die Auswahl gespeichert werden kann.

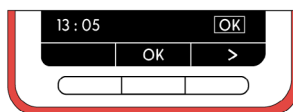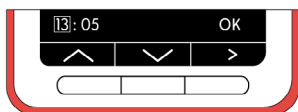

Hauptkonfigurationsbildschirm

Im Hauptkonfigurationsbildschirm stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Das **Einstellungsmenü** aufrufen.
- **Eine neue Erinnerung festlegen.**
- Verwenden Sie den Abschnitt **Übersicht Erinnerung**, um Ihre festgelegten Erinnerungen anzuzeigen oder zu bearbeiten.

Wählen Sie die Option **Zurück** um den Vorgang zu beenden und zum Hauptbildschirm der Uhr zurückzukehren.

Einstellungen ändern

Die **BBrain Sprechende Kalenderuhr** bietet eine Vielzahl von anpassbaren Einstellungen, um die gewünschten Präferenzen anzupassen.

Schritte zum Ändern der Einstellungen:

1. Drücken Sie gleichzeitig den linken und rechten äußeren Knopf, um den **Hauptkonfigurationsbildschirm** aufzurufen.
2. Gehen Sie zum **Einstellungsmenü**.
3. Um die gewünschte Einstellung zu ändern, wählen Sie sie aus und passen 5

Sie die Werte nach Bedarf an.

- i** Wenn Sie an irgendeiner Stelle im Einstellungsmenü nicht weiterkommen, stecken Sie die Uhr einfach aus und wieder ein. Es wird wieder die Uhr angezeigt.

Sprache

Die Uhr bietet eine Reihe von Sprachen zur Auswahl, mit denen die Texte auf dem Bildschirm, in den Menüs und die Spracherinnerungen geändert werden können.

Bildschirmmodus

Wählen Sie den gewünschten Bildschirmmodus. Die Uhr bietet eine Vielzahl digitaler und analoger Anzeigeooptionen, die mehr oder weniger detaillierte Informationen und Symbole anzeigen. Dies ermöglicht dem Nutzer, einen organisierten Zeitplan einzuhalten und ein leicht verständliches Zeitbewusstsein zu entwickeln.




Bildschirmfarbe


Wählen Sie die Bildschirmfarbe so, dass die Uhrzeit möglichst gut zu erkennen ist.



Schwarz

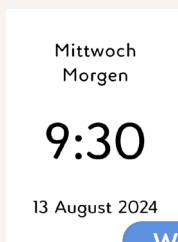

Weiß

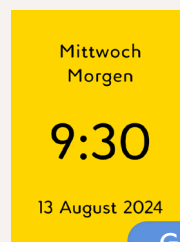

Gelb

Datum einstellen

Ermöglicht es dem Benutzer, das von der Uhr angezeigte Datum einzustellen.

Zeit einstellen

Stellen Sie die Zeit der Uhr ein.

Zeitmodus

Ermöglicht die Auswahl des angezeigten Zeitformats zwischen 12- und 24-Stunden-Modus.

Nachtmodus

Der Nachtmodus beginnt, wenn der „Nacht“-Teil des Tages beginnt. Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, wird der Bildschirmhintergrund schwarz, die Texte und Symbole werden gelb und die Helligkeit wird automatisch auf niedrig eingestellt.

Der tagsüber gewählte Bildschirmmodus bleibt auch nachts aktiv.

Sommer-/Winterzeit

Die Aktivierung dieser Funktion ermöglicht die automatische Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit: Die Uhr wird am letzten Sonntag im März um 2:00 Uhr morgens um eine Stunde vorgestellt und am letzten Sonntag im Oktober um 3:00 Uhr morgens um eine Stunde zurückgestellt.

Tagesteil einstellen

In diesem Menü kann der Benutzer die Startzeit für jeden Tagesteil aktivieren/deaktivieren und einstellen.

Die verfügbaren Tagesteile sind Morgen, Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend und Nacht.



Je nach gewählter Sprache sind die Standardwerte unterschiedlich.

Beispiel für Standardwerte für deutsche Benutzer:

Tagesteil	Standardwert
Morgen	06
Vormittag	09
Mittag	12
Nachmittag	13
Abend	18
Nacht	00

Beispiel für Standardwerte für englische/französische/italienische/spanische Benutzer:

Tagesteil	Standardwert
Morning	06
Vormittag	Deaktiviert
Mittag	12
Nachmittag	16
Abend	18
Nacht	00

- i** Wenn der Benutzer es wünscht, können die **Deaktiviert**-Tagesabschnitte einfach aktiviert werden, indem eine der verfügbaren Startzeiten für sie ausgewählt wird.

Helligkeit

Der Benutzer kann die Helligkeit des Uhrenbildschirms in drei Stufen auswählen: niedrig, normal oder hoch.

- i** Wenn die Helligkeit auf normal oder hoch eingestellt ist, wird sie auf niedrig gedimmt, wenn die Uhr den Tagesteil **Nacht** anzeigt.

Sprechende Uhr

Mit dieser Option kann der Benutzer einstellen, wann der Tag und die Uhrzeit hervorgehoben werden:

- Aus.
- Während Knopf drücken.
- Stündlich.
- Stündlich und Knopf.

i Wenn die sprechende Uhr so eingestellt ist, dass sie **stündlich** ertönt, ertönt sie nicht, während die Uhr **Nacht** anzeigt.

Bitte denken Sie daran, die Funktion **Sprechende Uhr** und die Erinnerungen nicht genau zur gleichen Zeit einzustellen.

Lautstärke Einstellung

Die Uhr bietet drei Lautstärkestufen für Erinnerungsalarme und die Wiedergabe der sprechenden Uhr: niedrig, normal, hoch und max.

Werkseinstellungen

Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle eingestellten Erinnerungen gelöscht. Alle benutzerdefinierten Einstellungen werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt. Die Uhrzeit und das Datum, die Sie eingestellt haben, bleiben jedoch erhalten.

Neue Erinnerung festlegen

Die Uhr kann bis zu 32 Erinnerungsalarme speichern, die einmalig, täglich oder wöchentlich ausgelöst werden können. Es können zwei Hauptkategorien von Erinnerungen verwendet werden: voreingestellte Erinnerungen oder personalisierte Spracherinnerungen.

Die voreingestellten Erinnerungen umfassen eine freundliche Sprachnachricht, einen Bildschirmhinweis und in einigen Fällen und ein Bild. Die voreingestellten Erinnerungen gibt es unter anderem für Medikamente, Ess- und Trinkgewohnheiten, Tag- und Nachtrhythmus, Sicherheit, Pflege und Körperpflege. Die vollständige Liste finden Sie in der weiter unten beschriebenen Option **Erinnerungstyp**.

Schritte zum Einstellen einer voreingestellten Erinnerung

1. Drücken Sie gleichzeitig den linken und rechten äußeren Knopf, um den **Hauptkonfigurationsbildschirm** aufzurufen.
2. Navigieren Sie durch das Menü und wählen Sie die Option **Neu**

Erinnerung festlegen.

3. Wählen Sie die Option **Erinnerungstyp**.
4. Wählen Sie eine voreingestellte Erinnerung aus der Liste. Wenn Sie eine Spracherinnerung bevorzugen, lesen Sie bitte den Abschnitt **Persönliche Erinnerungen aufnehmen** weiter unten.
5. Wählen Sie die Option **Frequenz**, um die Wiederholung der Erinnerung festzulegen, und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Einmal: Wählen Sie im Untermenü **Datum** das gewünschte Datum aus, um die Erinnerung zu aktivieren.
 - Täglich: Wählen Sie im nächsten Untermenü **Tage** die gewünschte Option aus:
 - o Jeden Tag (Montag bis Sonntag)
 - o Wochentage (Montag bis Freitag)
 - o Wochenende (Samstag und Sonntag)
 - Wöchentlich: Wählen Sie im Untermenü **Tag** den Wochentag aus, an dem die Erinnerung aktiv sein soll.
6. Wählen Sie die Option **Zeit**, um die Tageszeit festzulegen, zu der die Erinnerung ertönt und auf dem Bildschirm angezeigt wird.

i Hinweis: Wenn die **BBrain Sprechende Kalenderuhr** so eingestellt ist, dass sie stündlich ertönt, sollten Sie keine Erinnerungen so einstellen, dass sie zur gleichen Zeit ertönen, um eine Überschneidung der Funktionen zu vermeiden.


7. Navigieren Sie zu Angezeigt für, um die Dauer der visuellen Erinnerung auszuwählen, die auf dem Bildschirm aktiv bleiben soll. Bei Spracherinnerungen wird auf dem Bildschirm einfach das Wort **Erinnerung** angezeigt.
8. Gehen Sie zu **Nachrichtenwiederholungen**, um auszuwählen, wie oft die Audio-Nachricht wiederholt werden soll, wenn die Erinnerung aktiv ist. Jede Wiederholung der Audionachricht wird unmittelbar nacheinander erfolgen.

Wenn alle Parameter eingestellt sind, wählen Sie **Zurück**, um zum **Hauptkonfigurationsbildschirm** zurückzukehren, und wählen Sie erneut **Zurück**, um zum Uhrenbildschirm zurückzukehren.

Schritte zur Aufnahme einer personalisierten Spracherinnerung


Um personalisierte Spracherinnerungen zu erstellen, können Sprachnachrichten aufgenommen werden. Führen Sie dazu die Schritte 1 bis 3 aus dem Abschnitt **Neue Erinnerung festlegen** aus und dann:

1. Wählen Sie **Sprachtyp** aus der Erinnerungsliste aus. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

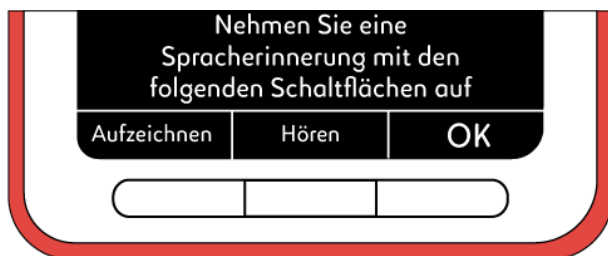

2. Drücken Sie auf **Aufnehmen**, um mit der Aufnahme Ihrer Nachricht zu beginnen, und auf **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden. Durch Klicken auf **Anhören** können Sie sich die Aufnahme anhören. Um die Nachricht erneut aufzunehmen, drücken Sie einfach noch einmal auf **Aufnehmen**. Am besten nehmen Sie eine möglichst kurze und klare Nachricht auf. Die Aufnahmezeit beträgt 12 Sekunden.
3. Wählen Sie nach Abschluss der Aufnahme **OK**, um den Vorgang zu beenden.
4. Von nun an erscheint die Spracherinnerung im Abschnitt **Übersicht Erinnerung** als „Voice1“.
5. Wenn zusätzliche Spracherinnerungen aufgezeichnet werden, erscheinen sie als „Voice2“, „Voice 3“ usw.
6. Wenn eine Sprachnachricht gelöscht wird, kann die entsprechende Anzahl von Sprachnachrichten wieder verwendet werden.

i Tipp: Für eine möglichst klare Aufnahme sprechen Sie nahe am Mikrofon oben auf der Uhr, rechts neben dem Knopf. Anweisungen zum Anpassen der Lautstärke finden Sie im Abschnitt **Einstellungen ändern**.

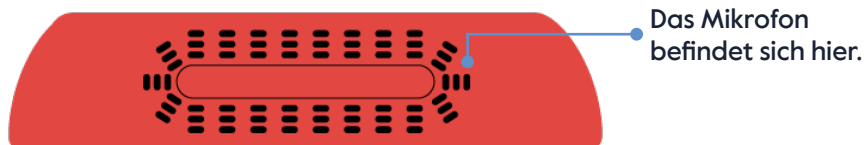

Übersicht Erinnerung

Der Abschnitt Übersicht Erinnerung befindet sich am unteren Ende des Hauptkonfigurationsbildschirms. Hier können Sie alle eingestellten Erinnerungen anzeigen, ändern und löschen. Wenn keine vorhanden sind, wird dieser Bereich leer angezeigt.



Wenn Sie einige der konfigurierbaren Erinnerungen ändern oder löschen möchten, wählen Sie die Schaltfläche **Bearbeiten**.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Die Funktion Sprechende Uhr ist nicht zu hören	Die Funktion Sprechende Uhr ist so eingestellt, dass sie stündlich ertönt und gleichzeitig eine Erinnerung erfolgt, oder die Funktion Sprechende Uhr ist ausgeschaltet. Vermeiden Sie es, Erinnerungen zu vollen Stunden einzustellen, wenn die sprechende Uhr so eingestellt ist, dass sie stündlich ertönt, und vergewissern Sie sich, dass die Funktion Sprechende Uhr eingeschaltet ist.
Einstellungen und Uhrzeit werden nicht gespeichert, wenn die Uhr von der Steckdose getrennt wird.	Die Batterie ist leer. Tauschen Sie die CR2032-Batterie aus, indem Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Uhr öffnen.

Es ist nicht möglich, neue Erinnerungen festzulegen	Die maximale Anzahl der möglichen Erinnerungen wurde erreicht. Löschen Sie die nicht verwendeten Erinnerungen, um weitere festzulegen.
Reminder with voice recording is too quiet	Move closer to the microphone (on top of the clock) when recording. Set the volume to high on the Setup Menu.

Weitere Informationen

Diese Uhr verfügt über eine Aussparung zum Aufhängen an der Wand. Vergewissern Sie sich, dass die Befestigungsmethode stark genug ist, um das Gewicht der Uhr zu tragen, um das Risiko des Herabfallens zu verringern.

- Wählen Sie den besten Standort für Ihre Uhr aus und stellen Sie sicher, dass sie gut sichtbar und in der Nähe angebracht ist.
- Sie kann auf einem Tisch stehen oder an der Wand befestigt werden.

Wenn die Uhr vom Stromnetz getrennt wird, werden Ihre voreingestellten Informationen von der integrierten CR2032-Batterie bis zu einem Jahr lang gespeichert. Wenn die Batterie leer ist, können Sie sie durch Öffnen der Klappe auf der Rückseite der Uhr austauschen. Achten Sie darauf, dass sich die Schrift auf der Oberseite der Batterie befindet. Dieses Produkt wird mit einer 24-monatigen Garantie auf Herstellungsfehler geliefert.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Uhr nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
- Trennen Sie die Uhr vor der Reinigung vom Stromnetz. Reinigen Sie den Bildschirm, indem Sie ihn vorsichtig mit einem speziellen Bildschirmtuch oder einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Verwenden Sie nicht zu viel Flüssigkeit.
- Bewahren Sie das Netzteil außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie die Uhr, das Netzkabel und den Stecker von Wasser fern.
- Versuchen Sie nicht, die Uhr zu reparieren, da dies gefährlich sein kann und die Garantie erlischt.
- Die Uhr ist nur für den Innenbereich geeignet.
- Entsorgen Sie diese Uhr ordnungsgemäß gemäß den in Ihrem Land geltenden Recyclingvorschriften. Elektroschrott kann die Umwelt schädigen und sollte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.



Brauchen Sie mehr Hilfe?

Besuchen Sie unsere Website, um Videos, Anleitungen und Tipps zu entdecken, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer BBrain Sprechende Kalenderuhr herauszuholen. Oder nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf und wir werden sehen, wie wir helfen können.



@ Email:

info@bbrain.eu



Telefon :

+31 (0)88 – 0080 130

