



L'orologio BBrain con promemoria giornaliero



Ciao!

Grazie per aver scelto l'orologio BBrain con promemoria giornaliero. Siamo entusiasti di aiutarti a ottenere il massimo dal tuo nuovo orologio. Questa guida ti mostrerà come utilizzarlo e personalizzarlo in base alle tue esigenze.

Sommario

Avvio rapido

Funzionamento dell'orologio

Schermata principale di configurazione

Modifica delle impostazioni

Lingua

Modalità display

Colore display

Impostazione data

Impostazione tempo

Modalità ora

Modalità notturna

Estate/Inverno

Impostazioni ora del giorno

Luminosità

Orologio parlante

Impostazione volume

Impostazioni di fabbrica

Impostare un nuovo promemoria

Quadro generale promemoria

Risoluzione dei problemi


Altre informazioni

Avvertenze importanti per la sicurezza

Hai bisogno di ulteriore aiuto?

Avvio rapido

L'orologio BBrain con promemoria giornaliero si avvia (1) collegando il cavo di alimentazione alla presa circolare sotto l'orologio e (2) collegando l'adattatore di alimentazione a una normale presa a muro.

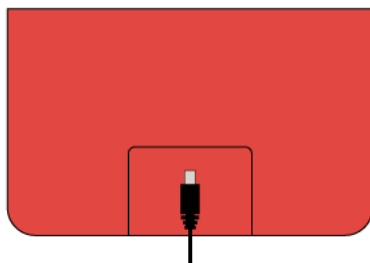

Dopo alcuni secondi, l'orologio visualizza la schermata di benvenuto di BBrain seguita dalla schermata principale di data e ora.

- i** Per regolare l'ora o la data e scegliere tra le diverse modalità display, consultare la sezione [Modifica delle impostazioni](#).




Il pulsante dell'**orologio parlante** si trova in alto. Premendolo si possono ascoltare le informazioni sul giorno e sull'ora.

L'orologio è dotato di tre pulsanti per modificare le impostazioni o i promemoria.



Per accedere alla schermata principale di configurazione, premere **contemporaneamente entrambi i pulsanti** esterni.

Funzionamento dell'orologio

Le funzioni dei pulsanti variano a seconda delle schermate del menu e sono sempre spiegate dalla parola o dal simbolo che si trova sopra ciascun pulsante. In alcuni casi, i pulsanti mostrano le frecce **Su** e **Giù** per navigare nei menu e un pulsante **OK** o **Modifica** per selezionare o modificare le funzioni:

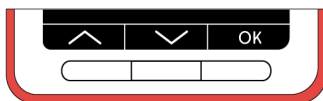

Quando si modificano le date, i pulsanti con le frecce **su** e **giù** devono essere utilizzati per regolare il valore selezionato. Il valore selezionato è sempre indicato da un **cursore** quadrato bianco. Il pulsante **frecchia sinistra**, situato a destra, consente di passare al campo successivo. Una volta raggiunto il valore finale, nel pulsante centrale apparirà l'opzione **OK** per salvare la selezione.

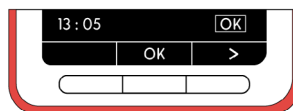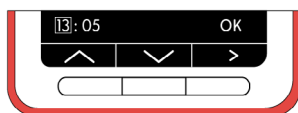

Schermata principale di configurazione

Nella schermata principale di configurazione sono disponibili le seguenti opzioni:

- Accedere al **Menu impostazioni**.
- **Impostare un nuovo promemoria**.
- Utilizzare la sezione Quadro generale promemoria per visualizzare o **modificare i promemoria impostati**.

Selezionare l'opzione **Indietro** per uscire e tornare alla schermata principale dell'orologio.

Modifica delle impostazioni

L'**orologio BBrain con promemoria giornaliero** offre una serie di impostazioni personalizzabili per adattarsi alle preferenze desiderate.

Passi per modificare le impostazioni:

1. Premere contemporaneamente i pulsanti esterni sinistro e destro per accedere alla **Schermata principale di configurazione**.
2. Passare al **Menu impostazioni**.
3. Per modificare l'impostazione desiderata, selezionarla e regolarne i valori come necessario.


- i** Se ci si blocca in qualsiasi punto del menu impostazioni, è sufficiente spegnere e riaccendere l'orologio dalla presa di corrente. Si tornerà al display dell'orologio.

Lingua

L'orologio offre una varietà di lingue da scegliere, modificando i testi sullo schermo, i menu e i promemoria vocali.

Modalità display

Scegliere la visualizzazione desiderata. L'orologio offre un'ampia gamma di opzioni di visualizzazione digitale e analogica, mostrando informazioni e icone più o meno dettagliate, consentendo all'utente di mantenere un'agenda organizzata e fornendo una consapevolezza del tempo facile da seguire.

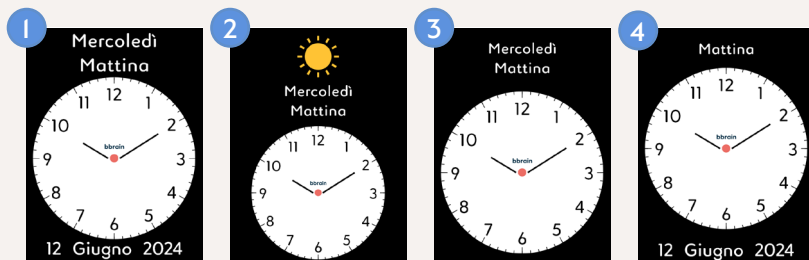



Colore display

Scegliere il colore del display dell'orologio per renderlo il più visibile possibile.



Nero



Bianco



Giallo

Impostazione data

Consente all'utente di impostare la data visualizzata dall'orologio.

Impostazione tempo

Imposta l'ora dell'orologio.

Modalità ora

Consente di scegliere il formato dell'ora visualizzato tra 12 o 24 ore.

Modalità notturna

La modalità notturna si attiva quando inizia la parte **notturna** del giorno. Quando si attiva la modalità notturna, lo sfondo dello schermo diventa nero, i testi e le icone diventano gialli e la luminosità si abbassa automaticamente.

La modalità di visualizzazione selezionata durante il giorno rimarrà attiva di notte.

Estate/Inverno

L'attivazione di questa funzione consente di passare automaticamente dall'orario estivo a quello invernale: gli orologi avanzano di un'ora alle 2:00 dell'ultima domenica di marzo e arretrano di un'ora alle 3:00 dell'ultima domenica di ottobre.

Impostazioni ora del giorno

Questo menu consente all'utente di attivare/disattivare e impostare l'ora di inizio di ciascuna parte del giorno.

Le parti del giorno disponibili sono **Mattina**, **Tarda mattinata**, **Mezzogiorno**, **Pomeriggio**, **Sera** e **Notte**.



A seconda della lingua scelta, i valori predefiniti variano.

Per il tedesco, si consiglia di abilitare le parti del giorno Vormittag e Nachmittag. Per l'olandese, si consiglia di disattivare Voormiddag e Namiddag. Per tutte le altre lingue, si consiglia di disattivare la voce **Tarda mattinata**:

Esempio di valori predefiniti per gli utenti tedeschi:

Parte del giorno	Valore predefinito
Morgen	06
Vormittag	09
Mittag	12
Nachmittag	13
Abend	18
Nacht	00

Esempi di valori predefiniti per utenti inglesi/francesi/italiani/spagnoli:

Parte del giorno	Valore predefinito
Mattina	06
Tarda mattinata	Disattivato
Mezzogiorno	12
Pomeriggio	16
Sera	18
Notte	00

- i** Se l'utente lo richiede, le parti del giorno **disattivate** possono essere facilmente attivate scegliendo uno degli orari di inizio disponibili.

Luminosità

L'utente può selezionare la luminosità dello schermo dell'orologio tra tre livelli: bassa, media o alta.

- i** Se la luminosità è impostata su media o alta, si abbassa mentre l'orologio visualizza la parte del giorno **notte**.



Orologio parlante

Questa opzione consente all'utente di impostare la pronuncia del giorno e dell'ora:

- Disattivato.
- Premendo il pulsante.
- Ogni ora.
- Ogni ora e pulsante.

i Se l'orologio parlante è impostato su un suono **ogni ora**, non suonerà mentre l'orologio visualizza **notte**.

Ricorda di non impostare la funzione **Orologio parlante** e i promemoria esattamente alla stessa ora.

Impostazione volume

L'orologio offre tre livelli di volume per i promemoria e la riproduzione dell'orologio parlante: basso, medio, alto o max.

Impostazioni di fabbrica

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancellerà tutti i promemoria impostati. Tutte le impostazioni personalizzate torneranno ai valori predefiniti. Tuttavia, l'ora e la data impostate verranno mantenute.

Impostare un nuovo promemoria

L'orologio può memorizzare un massimo di 32 allarmi promemoria che possono essere impostati per scattare una volta, ogni giorno o ogni settimana. È possibile utilizzare due categorie principali di promemoria: promemoria precaricati o promemoria vocali personalizzati.

I promemoria precaricati includono un messaggio vocale amichevole, un avviso sullo schermo e un'immagine. I promemoria precaricati riguardano, tra l'altro, i farmaci, l'orario di consumo di cibo e bevande, il ritmo del giorno e della notte, la sicurezza, i momenti di assistenza e l'igiene personale. L'elenco completo è visibile all'interno dell'opzione **Tipi di promemoria** descritta in seguito.



Procedura per impostare un promemoria precaricato

1. Premere contemporaneamente i pulsanti esterni sinistro e destro per accedere alla **Schermata principale di configurazione**.
2. Passare al menu e selezionare l'opzione **Impostare un nuovo promemoria**.
3. Scegliere l'opzione **Tipo di promemoria**.
4. Selezionare un promemoria preimpostato dall'elenco. Se si preferisce un promemoria vocale, consultare la sezione **Registrazione di promemoria personali** qui sotto.
5. Selezionare l'opzione **Frequenza** per impostare la ripetizione del promemoria, scegliendo una delle seguenti opzioni:
 - **Una volta**: dal sottomenu **Data**, selezionare la data desiderata per applicare il promemoria.
 - **Giornalmente**: dal sottomenu successivo **Giorni** selezionare l'opzione desiderata:
 - o Ogni giorno (dal lunedì alla domenica)
 - o Giorni feriali (dal lunedì al venerdì)
 - o Fine settimana (sabato e domenica)
 - **Settimanalmente**: dal sottomenu **Giorno** selezionare il giorno della settimana in cui il promemoria sarà attivo.
6. Selezionare l'opzione **Ora** per definire l'ora del giorno in cui il promemoria suonerà e sarà visualizzato sullo schermo.

i Nota: se l'orologio BBrain con promemoria giornaliero è impostato per suonare ogni ora, non impostare i promemoria in modo che suonino alla stessa ora per evitare la sovrapposizione delle funzioni.


7. Passa a **Visualizzato per** per scegliere la durata del promemoria visivo che rimarrà attivo sullo schermo. Per i promemoria vocali, lo schermo visualizzerà semplicemente la parola **Promemoria**.
8. Andare a **Ripetizioni messaggio** per selezionare quante volte si desidera che il messaggio audio venga ripetuto quando il promemoria è attivo. Ogni ripetizione del messaggio audio avverrà immediatamente dopo l'altra.

Una volta impostati tutti i parametri, selezionare **Indietro** per tornare alla **Schermata principale di configurazione** e selezionare nuovamente **Indietro** per tornare alla schermata dell'orologio.

Procedura per registrare un promemoria vocale personalizzato


Per creare promemoria vocali personalizzati, è possibile registrare messaggi vocali. A tale scopo, seguire i passaggi I-3 della sezione **Impostare un nuovo promemoria**, quindi:

1. Selezionare **Voce** dall'elenco dei promemoria. Verrà visualizzata la schermata seguente.

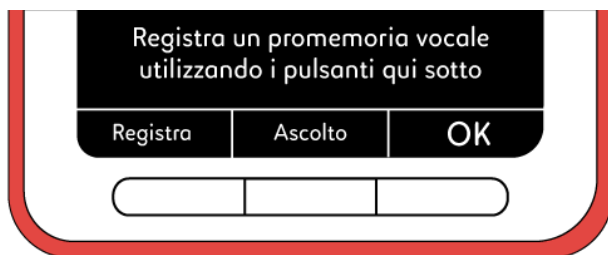

2. Premere **Registra** per iniziare a registrare il messaggio e **Stop** per terminare la registrazione. Il pulsante **Ascolta** consente di verificare la registrazione. Per registrare nuovamente il messaggio, è sufficiente premere ancora una volta **Registra**. È preferibile registrare un messaggio il più possibile breve e chiaro; il tempo di registrazione è di 12 secondi.
3. Al termine della registrazione, selezionare il pulsante **OK** per terminare il processo.
4. D'ora in poi, il promemoria vocale apparirà nella sezione **Quadro generale promemoria** come "Vocel".
5. Se vengono registrati altri promemoria vocali, questi appariranno come "Voce2", "Voce3" e così via.
6. Se un promemoria vocale viene cancellato, quel numero di promemoria vocale potrà essere riutilizzato.

i Suggerimento: per ottenere una registrazione più chiara, parlare vicino al microfono posto sopra l'orologio, a destra del pulsante. Le istruzioni per regolare il volume sono riportate nella sezione **Modifica delle impostazioni**.

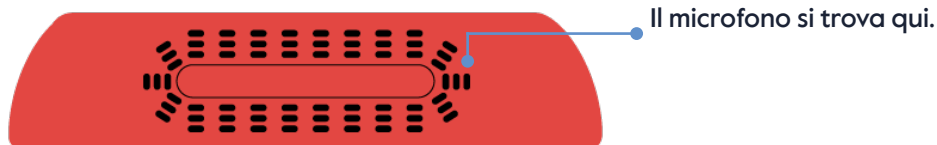

Quadro generale promemoria

La sezione **Quadro generale promemoria** si trova in fondo alla schermata principale di configurazione. Qui è possibile visualizzare, modificare ed eliminare i promemoria impostati. Se non ci sono promemoria, questa sezione apparirà vuota.



Se si desidera modificare o eliminare alcuni dei promemoria configurati, selezionare il pulsante **Modifica**.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa potenziale e soluzione
La funzione orologio parlante non suona	La funzione orologio parlante è impostata per emettere un suono ogni ora e un promemoria contemporaneamente, oppure la funzione orologio parlante è disattivata. Evitare di impostare promemoria alle ore esatte se l'orologio parlante è impostato per suonare ogni ora e verificare che la funzione orologio parlante sia attivata.
Le impostazioni e l'ora non vengono memorizzate quando l'orologio è scollegato dalla presa di corrente standard.	La batteria è scarica. Sostituire la batteria CR2032 aprendo il vano dello sportello della batteria sul retro dell'orologio.



Non è possibile impostare nuovi promemoria.	È stato raggiunto il numero massimo di promemoria consentiti. Cancellare i promemoria inutilizzati per impostarne altri.
Il promemoria con registrazione vocale è troppo silenzioso	Avvicinarsi al microfono (sopra l'orologio) durante la registrazione. Impostare il volume su alto nel Menu impostazioni .

Altre informazioni

Questo orologio è dotato di un incavo per essere appeso alla parete. Assicurarsi che il metodo di fissaggio sia abbastanza robusto da sostenere il peso dell'orologio per ridurre il rischio di urti.

- i** Scegliere la posizione migliore per l'orologio, assicurandosi che sia vicino e ben visibile.

Può essere collocato su un tavolo o montato a parete.

Quando l'orologio viene scollegato dalla rete elettrica, le informazioni preimpostate vengono salvate per un anno dalla batteria CR2032 integrata. Una volta esaurita la batteria, è possibile sostituirla aprendo lo sportello sul retro dell'orologio. Assicurarsi che la scritta si trovi sul lato superiore della batteria.

Questo prodotto viene fornito con una garanzia di acquisto di 24 mesi a copertura dei difetti di fabbricazione.

Avvertenze importanti per la sicurezza

- Utilizzare l'orologio solo con l'adattatore di corrente in dotazione.
- Scollegare l'orologio prima di pulirlo. Pulire lo schermo del display strofinandolo delicatamente con un panno speciale per schermi o con un panno morbido e umido. Non utilizzare liquidi in eccesso.
- Tenere il cavo dell'adattatore di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere l'orologio, il cavo di alimentazione e la spina lontano dall'acqua.
- Non tentare di riparare l'orologio per non incorrere in rischi e rendere nulla la garanzia.
- L'orologio è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Smaltire correttamente l'orologio secondo le norme di riciclaggio vigenti nella propria zona. I rifiuti elettrici possono danneggiare l'ambiente e non devono essere gettati insieme ai normali rifiuti domestici.





Hai bisogno di ulteriore aiuto?

Visita il nostro sito web per scoprire video, guide e suggerimenti che ti aiuteranno a sfruttare al meglio l'orologio BBrain con promemoria giornaliero. Oppure contattaci e vedremo come possiamo aiutarti.



@ **E-mail:** info@bbrain.eu

📞 **Telefono:** +31 (0)88 – 0080 130

