



BBrain talende ur med påmindelse



Hej!

Tak, fordi du valgte **BBrain talende ur med påmindelse**. Vi glæder os til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af dit nye ur. Denne brugervejledning viser dig, hvordan du bruger og tilpasser det, så det passer til dine behov.

Indholdsfortegnelse

Hurtig start

Betjening af dit ur

Hovedkonfigurationsskærm

Ændring af indstillinger

Sprog

Skærmtilstand

Displayets farve

Datoindstilling

Indstillet tid

Tidstilstand

Nattilstand

Sommer-/vintertid

Indstillinger for klokkeslæt

Lysstyrke

Talende ur

Indstilling af lydstyrke

Nulstil til fabriksindstillinger

Indstil ny påmindelse

Oversigt over påmindelser

Fejlfinding


Andre oplysninger

Vigtige sikkerhedsadvarsler

Har du brug for mere hjælp?

Schnellstart

BBrain talende ur med påmindelse er klar til brug ved (1) at sætte strømka-
blet i det runde stik under uret og (2) tilslutte strømadapteren til en alminde-
lig stikkontakt.

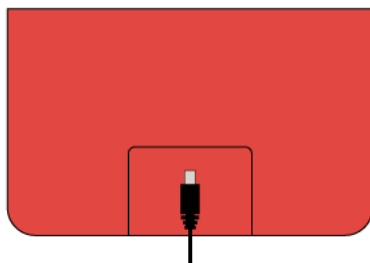


Efter et par sekunder viser uret BBrains velkomstskærm efterfulgt af hoveds-
kærmen med tid og dato.

- i** For at justere tid eller dato og vælge mellem de forskellige skærmtilstande henvises til afsnittet [Ændring af indstillinger](#).





Betjening af dit ur

Knapperne funktioner varierer fra menu til menu og forklares altid med ordet eller symbolet over hver knap. I nogle tilfælde viser knapperne **Op**- og **Ned**-pile til at navigere i menuerne og en **OK**- eller **Rediger**-knap til at vælge eller ændre funktioner:

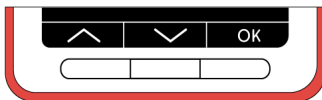

Ved redigering af datoer skal knapperne med pil **op** og pil **ned** bruges til at justere den valgte værdi. Den valgte værdi vises altid med en hvid, firkantet markør. Den højre pileknap, der er placeret til højre, gør det muligt at gå til næste felt. Når den endelige værdi er nået, vises en **OK**-mulighed i den midterste knap, så man kan gemme valget.

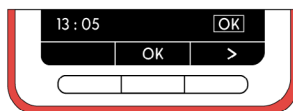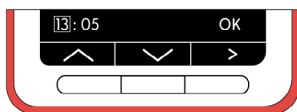

Hovedkonfigurationsskærm

På hovedkonfigurationsskærmen er følgende muligheder tilgængelige:

- Gå ind i **opsætningsmenuen**.
- **Indstil en ny påmindelse**.
- Brug sektionen **oversigt over påmindelser** til at se eller redigere dine indstillede påmindelser.

Vælg **Tilbage** for at afslutte og vende tilbage til urets hovedskærm.

Ændring af indstillinger

BBrain talende ur med påmindelse tilbyder en række indstillinger, der kan tilpasses, så de passer til de ønskede præferencer.

Trin til at ændre indstillingerne:

1. Tryk på de venstre og højre yderste knapper på samme tid for at få adgang til **Hovedkonfigurationsskærmen**.
2. Naviger til **Opsætningsmenu**.
3. For at ændre den ønskede indstilling skal du vælge den og justere dens værdier efter behov.


- i** Hvis du sidder fast et sted i opsætningsmenuen, skal du blot slukke og tænde for uret i stikkontakten. Den vender tilbage til urdisplayet.

Sprog

Uret tilbyder en række forskellige sprog, der kan vælges, og som ændrer teksten på skærmen, menuerne og stemmetyper påmindelserne.

Skærmtilstand

Vælg det ønskede display. Uret tilbyder en bred vifte af digitale og analoge display-muligheder, der viser mere eller mindre detaljerede oplysninger og ikoner, hvilket giver brugeren mulighed for at have en organiseret tidsplan og giver en letforståelig tidsbevidsthed.

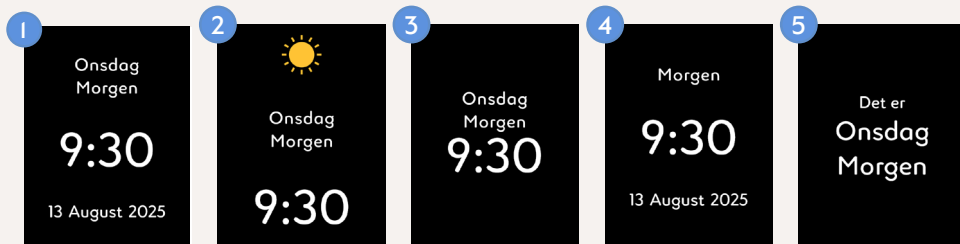

Displayets farve

Vælg farven på urets display for at gøre det så let som muligt at se.



Datoindstilling

Giver brugeren mulighed for at indstille den dato, der vises på uret.

Indstillet tid

Indstil tiden på uret.

Tidstilstand

Giver mulighed for at vælge det viste tidsformat: 12 eller 24 timer.

Nattilstand

Nattilstand starter, når den **natlige** del af dagen begynder. Når nattilstanden er aktiveret, bliver skærmens baggrund sort, tekster og ikoner gule, og lysstyrken sættes automatisk til lav.

Den skærmtilstand, der er valgt om dagen, forbliver aktiv om natten.

Sommer-/vintertid

Når du aktiverer denne funktion, kan du automatisk skifte mellem sommer- og vintertid: Uret stilles en time frem kl. 2.00 den sidste søndag i marts og en time tilbage kl. 3.00 den sidste søndag i oktober.

Indstillinger for klokkeslæt

Denne menu giver brugeren mulighed for at aktivere/deaktivere og indstille starttidspunktet for hver del af dagen.

De tilgængelige dele af en dag er morgen, formiddag, middag, eftermiddag, aften og nat.

Afhængigt af det valgte sprog vil standardværdierne være forskellige.

For tysk anbefales det at aktivere delene af dagen: Vormiddag og Nachmittag. For hollandsk anbefales det at deaktivere: Voormiddag og Namiddag. For alle andre sprog anbefales det at deaktivere 'Formiddag':

Eksempel på standardværdier for tyske brugere:

Del af dag	Standardværdi
Morgen	06
Vormiddag	09
Middag	12
Nachmiddag	13
Abend	18
Nacht	00

Eksempel på standardværdier for engelske/franske/italienske/spanske brugere:

Del af dag	Standardværdi
Morning	06
Formiddag	Deaktiveret
Middag	12
Eftermiddag	16
Aften	18
Nat	00

- i** Hvis brugeren har brug for det, kan de **deaktiverede** dele af dagen nemt aktiveres ved at vælge et af de tilgængelige starttidspunkter for dem.

Lysstyrke

Brugeren kan vælge mellem tre niveauer af lysstyrke på urskærmen: lav, mellem eller høj.

- i** Hvis lysstyrken er indstillet til mellem eller høj, dæmpes den til et lavt niveau, mens uret viser **natte**-delen af dagen.

Talende ur

Denne mulighed giver brugeren mulighed for at indstille, hvornår dag og tid skal udtales:

- Sluk.
- Knap for tid.
- Hver time.
- Timen og knappen.

i Hvis det talende ur er indstillet til at give lyd **hver time**, giver det ikke lyd, mens uret viser **nat**.

Husk at undgå at indstille funktionen **Talende ur** og påmindelserne på præcis samme tid.

Indstilling af lydstyrke

Uret har tre lydstyrkeniveauer til påmindelsesalarmer og afspilning af talende ur: lav, mellem, høj eller max.

Nulstil til fabriksindstillinger

Ved nulstilling til fabriksindstillingerne slettes alle indstillede påmindelser. Alle tilpassede indstillinger vender tilbage til standardindstillingerne. Det tidspunkt og den dato, du har indstillet, bevares dog.

Indstil ny påmindelse

Uret kan maksimalt gemme 32 påmindelsesalarmer, som kan indstilles til at blive sat i gang én gang, hver dag eller hver uge. Der kan bruges to hovedkategorier af påmindelser: præinstallerede påmindelser eller personlige stemmepåmindelser.

De præinstallerede påmindelser omfatter en venlig stemmebesked, en skærmeddelelse og et billede. De præinstallerede påmindelser vedrører blandt andet medicin, spise- og drikkeskema, dags- og natterytme, sikkerhed, plejelementer og personlig pleje. Den fulde liste kan ses i indstillingen **Type påmindelse**, som er beskrevet længere fremme.

Sådan indstiller du en præinstalleret påmindelse

1. Tryk på de venstre og højre yderste knapper på samme tid for at få adgang til **Hovedkonfigurationsskærmen**.
2. Naviger i menuen, og vælg **Indstil ny påmindelse**.
3. Vælg indstillingen **Type påmindelse**.
4. Vælg en forudindstillet påmindelse fra listen. Hvis du foretrækker en

stemmepåmindelse, kan du læse afsnittet **Optagelse af personlige påmindelser** nedenfor.

5. Vælg indstillingen **Frekvens** for at indstille gentagelsen af påmindelsen ved at vælge en af følgende muligheder:
 - En gang: I undermenuen **Dato** skal du vælge den ønskede dato for at anvende påmindelsen.
 - Hver dag: Brug den næste undermenu **Dage** for at vælge den ønskede mulighed:
 - o Hver dag (mandag til søndag)
 - o Hverdage (mandag til fredag)
 - o Weekender (lørdag og søndag)
 - Hver uge: Brug undermenuen **Dag** for at vælge den ugedag, hvor påmindelsen skal være aktiv.
6. Vælg indstillingen **Tid** for at definere det tidspunkt på dagen, hvor påmindelsen skal lyde og vises på skærmen.

i Bemærk: Hvis **BBrain talende ur med påmindelse** er indstillet til at give lyd hver time, må du ikke indstille påmindelser til at give lyd på samme tid for at undgå overlappende funktioner.


7. Naviger til **Vises i** for at vælge, hvor længe den visuelle påmindelse skal være aktiv på skærmen. For stemmepåmindelser vil skærmen blot vise ordet **Påmindelse**.
8. Gå til **Gentagelser af besked** for at vælge, hvor mange gange du vil have lydbeskeden gentaget, når påmindelsen er aktiv. Hver enkelt lydbesked gentages umiddelbart efter hinanden.

Når alle parametre er indstillet, skal du vælge **Tilbage** for at vende tilbage til **Hovedkonfigurationsskærmen** og vælge **Tilbage** igen for at vende tilbage til urskærmen.

Sådan optager du en personlig stemmepåmindelse


For at lave personlige stemmepåmindelser kan man indtale stemmebeskeder. Følg trin 1-3 i afsnittet **Indstil ny påmindelse**, og gør derefter følgende:

1. Vælg **Stemme** fra påmindelseslisten. Skærmen nedenfor vises.

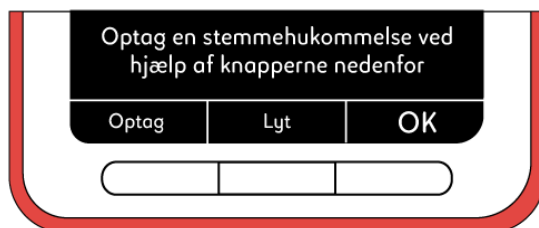


2. Tryk på **Optag** for at begynde at optage din besked og **Stop** for at afslutte optagelsen. Knappen **Lyt** gør det muligt at tjekke optagelsen. For at optage beskeden igen skal du blot trykke på **Optag** en gang til. Det er bedst at optage en besked, der er så kort og tydelig som muligt – der er 12 sekunders optagetid.
3. Når du er færdig med at optage, skal du vælge knappen **OK** for at afslutte processen.
4. Fra nu af vises stemmepåmindelsen i afsnittet **Oversigt over påmindelser** som 'Stemmel'.
5. Hvis der optages flere stemmepåmindelser, vises de som 'Stemme2', 'Stemme3' osv.
6. Hvis en stemmepåmindelse slettes, vil det pågældende nummer for stemmepåmindelse frit kunne genbruges.

i Tip: For at få den tydeligste optagelse skal du tale tæt på mikrofonen oven på uret, til højre for knappen. Du kan finde instruktioner til justering af lydstryken i afsnittet **Ændring af indstillinger**.

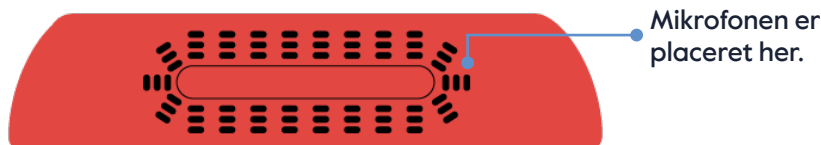

Oversigt over påmindelser

Afsnittet Oversigt over påmindelser findes nederst på Hovedkonfigurations-skærmen. Her kan du se, ændre og slette alle påmindelser, der er indstillet. Hvis der ikke er nogen, vil dette afsnit være tomt.

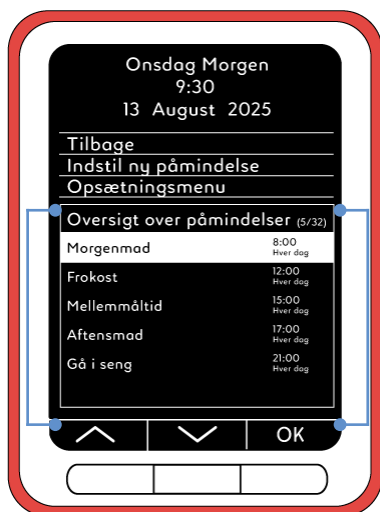

Hvis du vil ændre eller slette nogle af de konfigurerede påmindelser, skal du vælge knappen **Rediger**.

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag og løsning
Talende ur -funktion giver ikke lyd fra sig	Funktionen Talende ur er indstillet til at give lyd hver time, og en påmindelse gælder på samme tid, eller funktionen Talende ur er slukket. Undgå at indstille påmindelser på oprundede/nedrundede tidspunkter, hvis det talende ur er indstillet til at give lyd hver time, og kontroller, at funktionen Talende ur er slået til.
Indstillinger og tid gemmes ikke, når uret tages ud af stikkontakten.	Batteriet er fladt. Udskift CR2032-batteriet ved at åbne døren til batterirummet på bagsiden af uret.
Det er ikke muligt at indstille nye påmindelser	Die maximale Anzahl der möglichen Erinnerungen wurde erreicht. Löschen Sie die nicht verwendeten Erinnerungen, um weitere festzulegen.
Påmindelse med stemmeoptagelse er for stille	Flyt tættere på mikrofonen (oven på uret), når du optager. Indstil lydstyrken til høj i opsætningsmenuen.

Andre oplysninger

Dette ur har en fordybning til ophængning på væggen. Sørg for, at fastgørelsesmetoden er stærk nok til at bære urets vægt for at mindske risikoen for stød.

- Vælg den bedste placering til dit ur, og sørg for, at det er tæt på, tydeligt og synligt.
- Det kan placeres på et bord eller monteres på en væg.

Når uret kobles fra elnettet, gemmes de forudindstillede oplysninger i op til et år af det integrerede CR2032-batteri. Når batteriet er fladt, kan du skifte det ved at åbne klappen på bagsiden af uret. Sørg for, at skriften er på oversiden af batteriet.

Dette produkt leveres med 24 måneders købsgaranti til dækning af produktionsfejl.

Vigtige sikkerhedsadvarsler

- Brug kun uret med den medfølgende strømadapter.
- Tag uret ud af stikkontakten før rengøring. Rengør skærmen ved forsigtigt at tørre den af med en særlig skærmklud eller en blød, fugtig klud. Brug ikke for meget væske.
- Opbevar ledningen til strømadapteren utilgængeligt for børn.
- Hold uret, netledningen og stikket væk fra vand.
- Forsøg ikke at reparere uret, da det kan være farligt og medføre, at garantien bortfalder.
- Uret er kun til indendørs brug.
- Bortskaf dette ur korrekt i henhold til reglerne for genbrug i dit område. Affald fra elektriske produkter kan skade miljøet og bør ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald.



Har du brug for mere hjælp?

Besøg vores hjemmeside for at finde videoer, vejledninger og tips, der kan hjælpe dig med at få mest muligt ud af dit BBrain talende ur med påmindelse. Eller kontakt os blot, og så ser vi, hvordan vi kan hjælpe.



Email:

info@bbrain.eu



Telefon :

+31 (0)88 – 0080 130

